


## PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ antigenního testování ve školách



# TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

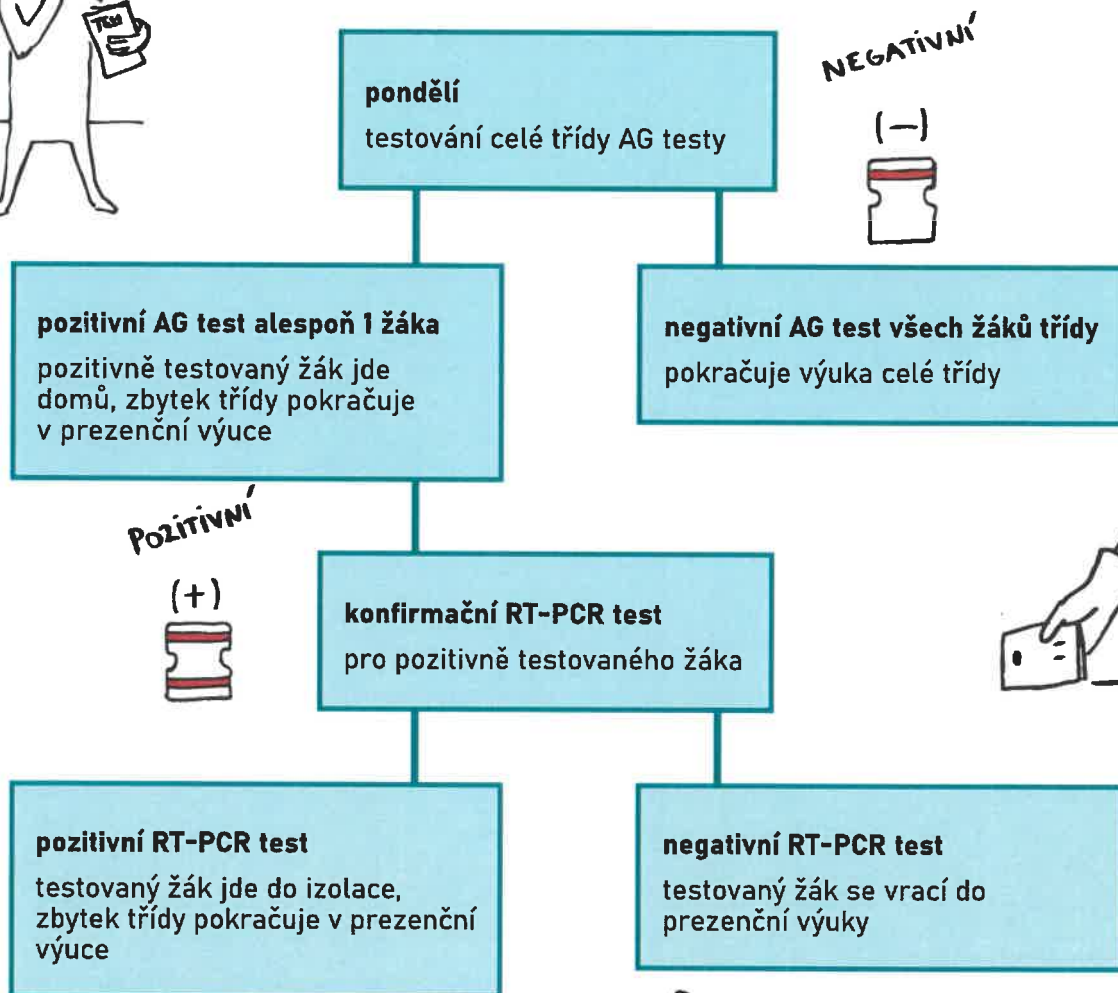

**středa/čtvrtek**  
testování celé třídy AG testy



**pozitivní AG test alespoň 1 žáka**  
celá třída jde domů a čeká se na  
potvrzující RT-PCR test pozitivně  
testovaného žáka

**negativní AG test všech žáků třídy**  
pokračuje výuka

**POZITIVNÍ**


**NEGATIVNÍ**



**konfirmační RT-PCR test**  
pro pozitivně testovaného žáka

**pozitivní RT-PCR test**  
celé třídě je nařízena karanténa  
KHS

**negativní RT-PCR test**  
celá třída jde do školy

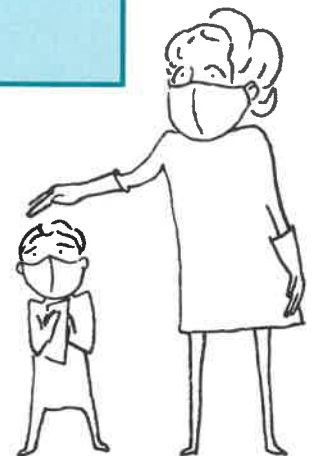

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní pedagogický institut  
České republiky

# TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO




1 Vydezinfikuješ si ruce



2 Posadíš se ke stolu




3 Dostaneš instruktáž

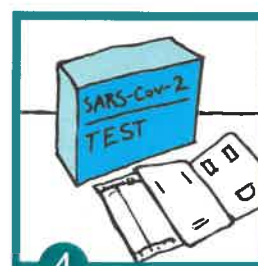


4 Rozbalíš si test



5 Tyčinkou 5× otočíš v každé nosní dírce

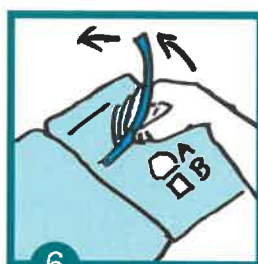

6 Odstraníš fólii z testu

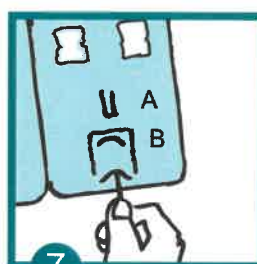


7 Prostrčíš konec tyčinky otvorem B do A



8 Test se zakape roztokem




9 Otočíš 2× tyčinkou tam a zpět

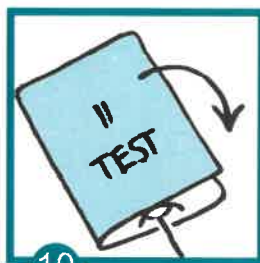

10 Zavřeš test



11 Stopujeme 15 minut

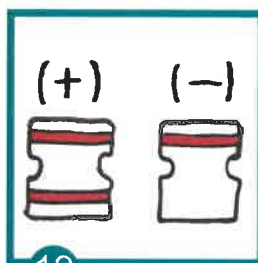

12 A máš tu výsledek



13 Ukazuje to něco jiného? Výsledek se zaznamená test je neplatný, musíš se otestovat znovu



14



15 Test vyhodíš a vydezinfikuješ si ruce



16 Jsi negativní: pokračuješ do výuky s ostatními



17 Jsi pozitivní: počkáš na rodiče a jdete domů



18 Škola ti vystaví potvrzení o tom, že ti test vyšel pozitivně

